

Čím více osobních nastavení, tím účinnější léčba

Do této brožurky si můžete napsat údaje, které vám umožní osobní nastavení systému MiniMed Paradigm REAL-Time a maximální využití výhod kalkulátoru Bolus Wizard. Přizpůsobte si systém svým potřebám a vložte do něj rychlosti bazálních dávek, faktorů citlivosti na inzulín, poměrů sacharidů a cílových hodnot glykémii pro různé části dne. Toto unikátní osobní nastavení vám pomáhá zaručit, že odhady bolusových dávek více odpovídají vašim potřebám, což vám pomůže dosáhnout ještě lepší kontroly glykémii.

Dávkování pomocí kalkulátoru Bolus Wizard je jednoduché

- Změřte si vaši glykémii a hodnotu zadejte do inzulínové pumpy.
- Vložte množství sacharidů ve vašem jídle v gramech nebo výměnných jednotkách. Pokud nebudete jíst a chcete aplikovat pouze korekční bolusovou dávku ke snížení hyperglykémie, tento krok vynechejte.
- Kalkulátor Bolus Wizard vám navrhne vypočtenou dávku inzulínu. Můžete přijmout nebo upravit navržené množství inzulínu a začít s jeho podáváním. Aby vám pomohl překontrolovat odhadnutou dávku, zobrazí kalkulátor Bolus Wizard co nejkomplexnější seznam údajů, které jsou k dispozici.



Vaše údaje pro systém MiniMed Paradigm® REAL-Time



Nastavení bazálních dávek a údajů pro kalkulátor Bolus Wizard

Datum / Den:

čas	rychlost bazálu v j/hod.	čas	rychlost bazálu v j/hod.
půlnoc–01.00		12.00–13.00	
01.00–02.00		13.00–14.00	
02.00–03.00		14.00–15.00	
03.00–04.00		15.00–16.00	
04.00–05.00		16.00–17.00	
05.00–06.00		17.00–18.00	
06.00–07.00		18.00–19.00	
07.00–08.00		19.00–20.00	
08.00–09.00		20.00–21.00	
09.00–10.00		21.00–22.00	
10.00–11.00		22.00–23.00	
11.00–12.00		23.00–půlnoc	

čas	Citlivost k inzulínu (ISF) (mmol/l)	Sacharidový poměr (inzulín/sacharidy) (g)	Cílová glykémie (mmol/l)
půlnoc–06.00			
06.00–12.00			
12.00–18.00			
18.00–půlnoc			